



Reinigingsdoekjes

voor de oogleden

Oogdoekjes voor ooglidhygiëne voor volwassenen en kinderen.

Inclusief verwarmbaar oogkompres.

AYZ Reinigingsdoekjes voor de oogleden zijn eenmalig te gebruiken doekjes van natuurlijk katoen met Hy-Ter® (natriumhyaluronaat en natuurlijk tea tree -extract) en aloë vera, dat zorgt voor een reinigend, verzachtend en kalmerend effect.

Het AYZ Reinigingsdoekje bevat natuurlijke ontstekingsremmers en antiseptica voor snelle verlichting van symptomen.

Goede ooghygiëne is cruciaal in geval van potentiële en aanhoudende ontstekings- en infectiesituaties.

De Hy-Ter®-formule maakt de AYZ Reinigingsdoekjes bijzonder geschikt voor ooglid- en wimperhygiëne, en als hulpmiddel bij:

- antiseptische behandeling tijdens pre- en postoperatieve chirurgie;
- bacteriële en allergische conjunctivitisbehandeling;
- blefaroconjunctivitis en in het geval van chalazion en stijg.

Bij posterieure blefaritis zijn de afvoergangen van de klieren van Meibom ontstoken en zijn deze geblokkeerd. Deze klieren bevinden zich binnenin de oogleden en produceren een olie die voorkomt dat de traanfilm verdampt. Door te behandelen met een warm oogkompres gecombineerd met een ooglidmassage kunnen deze klieren geopend en gereinigd worden, om zo de natuurlijke productie te hervatten van de lipiden die nodig zijn voor een gezonde traanfilm.


INGREDIËNTEN:

Aqua, PEG / PPG - 20/15 dimethicon, aloë barbadensis-extract, Hy-Ter® (natriumhyaluronaat, 4-terpineol), ammoniumglycyrrhizaat, caprylyl / capryl-glucoside, natrium-cocoyl-tarwe-aminozuren, ethylhexylglycerine, fenethylalcohol, natriumchloride, natriumfosfaat, dinatriumfosfaat, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 gehydrogeneerde castorolie.

INHOUD DOOS

28 eenmalig te gebruiken doekjes + 1 verwarmbaar oogkompres

GEBRUIK EN TOEDIENING:

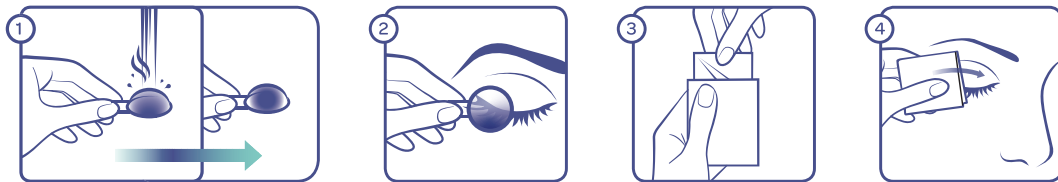

GEBRUIK EN TOEDIENING

1. Verwarm het kompres totdat het van kleur verandert. Op dat moment heeft het kompres de juiste temperatuur bereikt voor een effectieve ooglidmassage. Indien het kompres niet meer van kleur verandert binnen de houdbaarheidstermijn van het product, blijft de capaciteit om te verwarmen gegarandeerd. Controleer dat het kompres niet te heet is geworden alvorens op het oog te leggen door met het kompres de binnenzijde van uw pols aan te raken.
2. Houd het warme kompres vast aan de flap, masseer het ooglid 3-5 minuten en oefen lichte druk uit. Houd het oog gedurende deze hele behandeling gesloten.
3. Open het zakje direct na het gebruik van het oogkompres door het ingesneden hoekje door te scheuren en neem het doekje uit het zakje.
4. Reinig de oogleden en wimpers door met het doekje voorzichtig van de ene naar de andere ooghoek te poetsen. Ga zo nodig enkele keren heen en weer. Maak de laatste beweging van de buitenhoek naar de binnenhoek van het oog om de laatste restjes te verwijderen. Houd het oog gedurende deze hele behandeling gesloten.

OOGKOMPRES OPWARMEN

U kunt uw oogkompres op de volgende manieren opwarmen:

1. Houd het kompres onder heet kraanwater tot de kleur verandert.

2. Houd het kompres vast aan de flap en doop in heet water tot de kleur verandert.

Controleer altijd de temperatuur voordat u uw ogen masseert, door met het kompres de binnenzijde van uw pols aan te raken. Als dit te heet aanvoelt, probeert u het een paar minuten later nogmaals.

Schud het kompres voor gebruik, als de kleur niet uniform is.

Controleer of het kompres onbeschadigd is voor u het nogmaals gebruikt.

Spoel het kompres na gebruik af met water en plaats weer terug in de verpakking.

Als het kompres niet uit zichzelf de oorspronkelijke kleur aanneemt, kunt u het een nacht in de koelkast bewaren.

Gebruik voor ieder oog een nieuw reinigingsdoekje. Was uw handen vóór en na gebruik. Spoel uw oog niet na de behandeling.

BIJWERKINGEN

Er zijn geen bijwerkingen bekend die verbonden zijn met het gebruik van dit product.

Neem contact op met uw arts als u bijwerkingen ervaart.

WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMATREGELEN

Extern gebruik: uitsluitend voor toepassing rondom het oog, met gesloten oog.

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor een van de ingrediënten.

Stop de behandeling in geval van een aanhoudend brandend gevoel.

Ieder doekje is bedoeld voor eenmalig gebruik, open het zakje kort voor het gebruik.

Deels gebruikte doekjes niet hergebruiken om vervuiling en verminderde werkzaamheid te vermijden.

Gebruik het product niet als het zakje niet goed afgesloten en/of beschadigd is.

Buiten bereik van kinderen houden.

Als je nog andere medicijnen voor het oog gebruikt, wacht dan 15 minuten voor gebruik van een AYZ reinigingsdoekje.

Er zijn geen gegevens bekend van gebruik van het product tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding, raadpleeg daarom uw zorgverlener voorafgaand aan gebruik ervan.

Gebruik voor ieder oog een nieuw doekje. Was je handen voor het gebruik.

Spoel je oog na gebruik niet.

Prik niet in het kompres en/of slik de inhoud niet door.

Gooi het kompres weg als u het laatste zakje van de productverpakking verbruikt heeft.

BEWAREN

Gebruik dit product niet na de op de verpakking vermelde vervaldatum.

Bewaar op kamertemperatuur en vermijd contact met water.

De vervaldatum verwijst naar het product in een onbeschadigde verpakking, die op de juiste manier bewaard wordt.



NTC Srl, Via Luigi Razza, 3 20124
Milano Italië

VERSIE: AUGUSTUS 2020

Distributie Nederland:

Tramedico B.V. Korte Muiderweg 2
1382 LR Weesp
info@tramedico.nl



Hy-Ter® is a registered trademark of NTC srl.