

OCUsalin® 5% OSD

Oogdruppels

Steriele hypertone zoutoplossing 5 %
Zonder conserveermiddel.

BESCHRIJVING

OCUsalin® 5% OSD is een steriele, hypertone zoutoplossing voor oogheelkundig gebruik, zonder conserveermiddelen, afgevuld in flacons.

OCUsalin® 5% OSD wordt gebruikt voor de behandeling van cornea-oedeem en verwijdert door zijn fysisch-osmotische eigenschappen de overtollige vloeistof en verbetert daarmee het gezichtsvermogen.

OCUsalin® 5% OSD wordt vooral toegepast na oogoperaties (bijvoorbeeld cataractchirurgie) en na diagnostische ingrepen aan het oog (bijv. gonioscopie), indien er een verstoring is van de osmotische balans van het hoornvliesweefsel.

WIJZE VAN TOEDIENING

Open de flacon door aan het lipje van de veiligheidsring te trekken tot deze volledig is verwijderd (1 + 2). Verwijder vervolgens de dop door deze omhoog te trekken (3). Houd uw hoofd licht achterover, kijk naar boven en trek het onderste ooglid weg van het oog. Houd de flacon met de opening naar beneden en laat zo 3-5 keer per dag één druppel vallen tussen het onderste ooglid en het oog (= conjunctivaal-zak) (4). Sluit uw ogen langzaam om te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de vloeistof op het oogoppervlak. Vermijd elk contact tussen de opening van de flacon en het oog of de handen. Een achterblijvende druppel op de opening van de flacon kan worden verwijderd door licht te tikken op de bodem van de flacon. Sluit dan de flacon door de dop zacht op de opening te drukken.

Bespreek de dosering en de duur van het gebruik met uw oogarts!

Door het speciale innovatieve steriel-filtersysteem van de druppelaar blijft altijd een kleine hoeveelheid in de flacon achter.



SAMENSTELLING

5 % natriumchloride, water voor injectie.

VERPAKKINGSGROOTTE

Handelsverpakking van 1 x 10 ml

VOORZORGEN EN WAARSCHUWINGEN

Gebruik dit medisch hulpmiddel niet zonder medisch advies!

- Gebruik het product niet als de veiligheidsring van de dop is verbroken of als de flacon beschadigd is.
- Raak het oog niet aan met de druppelaar.
- Bij dit soort aandoeningen van het hoornvlies moet in het algemeen het dragen van contactlenzen worden vermeden. Mocht het dragen van contactlenzen toch nodig zijn, dan moeten deze worden verwijderd vóór het toedienen. Wacht na het toedienen ten minste 15 minuten alvorens de contactlenzen weer in te brengen.
- Als gelijktijdig met OCUsalin® 5% OSD ook andere geneesmiddelen in het oog worden toegepast, neem dan contact op met uw behandelend oogarts. Er moet ten minste 5 minuten verstrijken tussen het toedienen van beide producten. Een branderig gevoel en/of irritatie van het aangedane oog kan optreden.
- Gebruik de oogdruppels niet na de vervaldatum die u kunt vinden op elke flacon voor meervoudig gebruik en op de doos.
- Gebruik de oogdruppels niet langer dan 90 dagen na eerste opening.

BEWAREN

Bewaren tussen 2° en 25°C. Niet in de vriezer bewaren. Sluit de flacon na gebruik met de dop. Bewaren in het doosje ter bescherming tegen licht.

 Het lotnummer en  vervaldatum zijn vermeld op het etiket en het doosje.

 Aseptisch bereid.



Houd u aan de instructies in de gebruiksaanwijzing.



Bewaartemperatuur



Bij beschadigde verpakking niet gebruiken



Fabrikant:
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Duitsland

Distributeur in Nederland:
Tramedico B.V.
Korte Muiderweg 2
1382 LR Weesp

 0483

Datum van de gebruiksaanwijzing: 03/2018

**Bitte beachten!**

Diese Daten dienen nur zur Abstimmung des Layouts. Farben sind im Ausdruck nicht farbverbindlich! Ebenso obliegt die Verantwortung für die Richtigkeit der Code (EAN/PZN, Laetuscode, Sichtmarken, produktionsinterne Nummern etc.) nicht *Weber druck & mehr...*, eine finale technische Prüfung muss vom Kunden durchgeführt werden.

Name: Ocusalin	Land: NL	Korrekturverlauf: 1. Abzug: 26.02.18 Fr. Künzl 2. Abzug: 3. Abzug: 4. Abzug:
Objekt: Beileger	Version: 22.0390.02	
Maße: 135x210	Laetus: 29	
PMR-Nr:	Ptgröße: -	
Farben: Schwarz		